

Anwendung – Fertigpen



Wie Sie sich den Fertigpen von KEVZARA® selbst richtig verabreichen

Mein Rheuma-Begleiter –
der Service für RA-Patienten
von Sanofi Genzyme

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

SANOFI GENZYME 

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

Ihr Arzt hat Ihnen KEVZARA® verordnet. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fertigpen zur Gabe einer Einmaldosis (in dieser Bedienungsanleitung als „Pen“ bezeichnet). Er enthält 200 mg KEVZARA®, das einmal alle zwei Wochen unter die Haut gespritzt wird (subkutane Injektion).

Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt bzw. dem medizinischen Fachpersonal vor der ersten Injektion zeigen, wie der Pen ordnungsgemäß angewendet wird.

Diese Broschüre ersetzt nicht die Gebrauchsinformation.
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation.

- ▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.

Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe www.pei.de.



Was Sie tun sollten

- ✓ Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie einen Pen anwenden.
- ✓ Überprüfen Sie, ob es sich um das richtige Arzneimittel und die richtige Dosis handelt.
- ✓ Nicht verwendete Pens in der Originalverpackung aufbewahren und im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C lagern, auch während eines Transports.
- ✓ Vor der Anwendung mindestens 60 Minuten warten, bis der Pen Raumtemperatur angenommen hat.
- ✓ Verwenden Sie den Pen innerhalb von 14 Tagen, nachdem Sie ihn aus dem Kühlschrank genommen haben.
- ✓ Den Pen für Kinder unzugänglich aufbewahren.




Was Sie nicht tun sollten

- ✗ Verwenden Sie den Pen nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn die Verschlusskappe fehlt oder nicht aufgesteckt ist.
- ✗ Ziehen Sie die Verschlusskappe nicht ab, bevor Sie für die Injektion bereit sind.
- ✗ Berühren Sie nicht den gelben Nadelschutz.
- ✗ Setzen Sie die Verschlusskappe nicht wieder auf den Pen.
- ✗ Sie dürfen den Pen nicht wiederverwenden.
- ✗ Sie dürfen den Pen nicht einfrieren oder erhitzen.
- ✗ Nach der Entnahme aus dem Kühlschrank dürfen Sie den Pen nicht über 25 °C lagern.
- ✗ Setzen Sie den Pen nicht direktem Sonnenlicht aus.
- ✗ Sie dürfen den Pen nicht durch die Kleidung hindurch verwenden.

DIESE ABBILDUNG ZEIGT DIE KOMPONENTEN DES FERTIGPENS.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen,
wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische
Fachpersonal oder an:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
D-65926 Frankfurt am Main
Telefon: (0800) 04 36 996
medinfo.de@sanofi.com

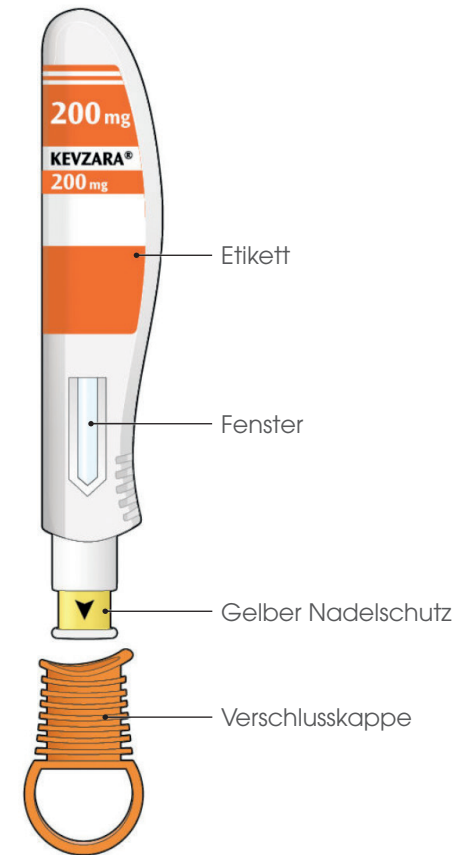


Schritt A: Vorbereitung der Injektion

1. Legen Sie alle erforderlichen Materialien auf eine saubere, ebene Arbeitsfläche.

- Sie benötigen einen Alkoholtupfer, ein Stück Watte oder Gaze und ein durchstichsicheres Behältnis.
- Umfassen Sie einen Pen in der Mitte des Penkörpers und entnehmen Sie ihn aus der Verpackung. Lassen Sie den anderen Pen im Karton im Kühlschrank liegen.



2. Schauen Sie sich das Etikett an.

- Überprüfen Sie, ob es sich um das richtige Arzneimittel und die richtige Dosis handelt.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum (verw. bis), das auf der Seite des Pens angegeben ist.
- ✗ Verwenden Sie den Pen **nicht** nach Ablauf des Verfalldatums.

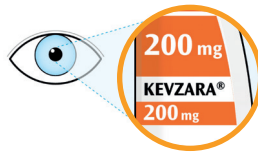

3. Schauen Sie sich das Fenster an.

- Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit klar und farblos bis blassgelb ist.
- Möglicherweise sehen Sie eine Luftblase. Das ist normal.
- ✗ Verwenden Sie den Pen **nicht**, wenn die Flüssigkeit trüb oder verfärbt ist oder Partikel enthält.
- ✗ Verwenden Sie den Pen **nicht**, wenn das Fenster gelb ist.

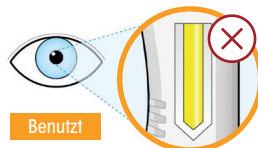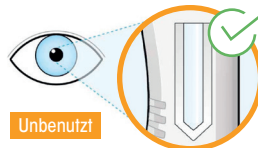


4. Legen Sie den Pen auf eine ebene Oberfläche und warten Sie mindestens 60 Minuten, bis er Raumtemperatur (<25 °C) angenommen hat.

- Die Anwendung des auf Raumtemperatur erwärmten Pens erleichtert die Injektion.
- ✗ Verwenden Sie den Pen **nicht**, wenn er länger als 14 Tage außerhalb des Kühlschranks gelagert worden ist.
- ✗ Den Pen **nicht** erhitzen. Lassen Sie ihn ohne Zugabe von Wärme Raumtemperatur annehmen.
- ✗ Setzen Sie den Pen **nicht** direktem Sonnenlicht aus.



5. Wählen Sie die Injektionsstelle aus.

- Sie können das Arzneimittel in Ihren Oberschenkel oder den Bauch (Unterbauch) spritzen, außer in einem Umkreis von 5 cm um den Bauchnabel herum. Wenn jemand anderes Ihnen die Injektion verabreicht, kann auch die Außenseite des Oberarms verwendet werden.
- Wechseln Sie die Injektionsstelle bei jeder Injektion.
- ✗ Injizieren Sie den Pen **nicht** in empfindliche, verletzte oder vernarbte Hautstellen oder in Hautstellen mit blauen Flecken.

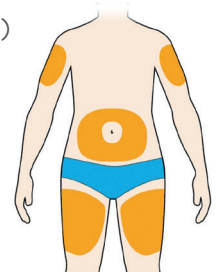

● Injektionsstellen

6. Bereiten Sie die Injektionsstelle vor.


- Waschen Sie sich die Hände.
- Reinigen Sie die Haut der Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.
- ✗ Berühren Sie die Injektionsstelle vor der Injektion **nicht** mehr.

Schritt B: Durchführung der Injektion

Schritt B darf erst nach Abschluss von Schritt A „Vorbereitung einer Injektion“ ausgeführt werden.


1. Drehen oder ziehen Sie die orangefarbene Verschlusskappe ab.

- ✗ Ziehen Sie die Verschlusskappe **nicht** ab, bevor Sie für die Injektion bereit sind.
- ✗ Berühren Sie **nicht** mit dem Finger den gelben Nadelschutz.
- ✗ Setzen Sie die Verschlusskappe **nicht** wieder auf den Pen.

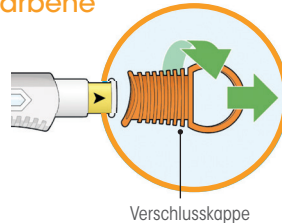

2. Legen Sie den gelben Nadelschutz in einem Winkel von etwa 90° an Ihrer Haut an.

- Sie müssen das Fenster sehen können.

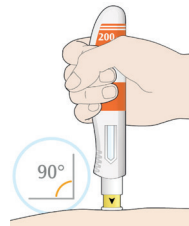


3. Drücken Sie den Pen fest auf Ihre Haut und halten Sie ihn in dieser Position.

- Wenn die Injektion beginnt, ertönt ein „Klick“.



4. Halten Sie den Pen weiter fest auf Ihre Haut gedrückt.

- Das Fenster beginnt, gelb zu werden.
- Die Injektion kann bis zu 15 Sekunden dauern.

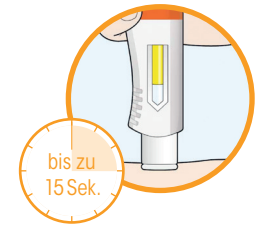


5. Ein zweiter Klick ertönt. Überprüfen Sie, ob das gesamte Fenster gelb geworden ist, bevor Sie den Pen entfernen.

- Wenn Sie keinen zweiten Klick hören, sollten Sie dennoch überprüfen, ob das Fenster vollständig gelb geworden ist.
- ✗ Wenn das Fenster nicht vollständig gelb geworden ist, wenden Sie **keine** zweite Dosis an, bevor Sie mit Ihrem behandelnden Arzt gesprochen haben.




6. Entfernen Sie den Pen von Ihrer Haut.

- Falls Sie etwas Blut sehen, drücken Sie ein Stück Watte oder Gaze auf die Stelle.
- ✗ Reiben Sie nach der Injektion **nicht** über die Hautstelle.

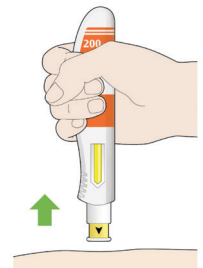


7. Entsorgen Sie den gebrauchten Pen und die Verschlusskappe unmittelbar nach der Anwendung in einem durchstichsicheren Behälter.

- Bewahren Sie das Behältnis immer für Kinder unzugänglich auf.
- ✗ Setzen Sie die Verschlusskappe **nicht** wieder auf den Pen.
- ✗ Entsorgen Sie den gebrauchten Pen **nicht** im Haushaltsabfall.
- ✗ Recyceln Sie Ihr gebrauchtes durchstichsicheres Behältnis **nicht**.
- ✗ Entsorgen Sie Ihr gebrauchtes durchstichsicheres Behältnis **nicht** im Haushaltsabfall, es sei denn, die lokalen Vorschriften erlauben dies. Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wie das Behältnis zu entsorgen ist.

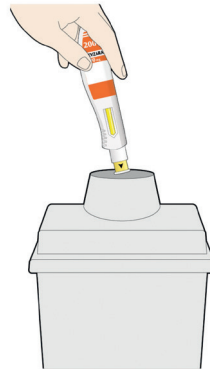

Persönliche Notizen

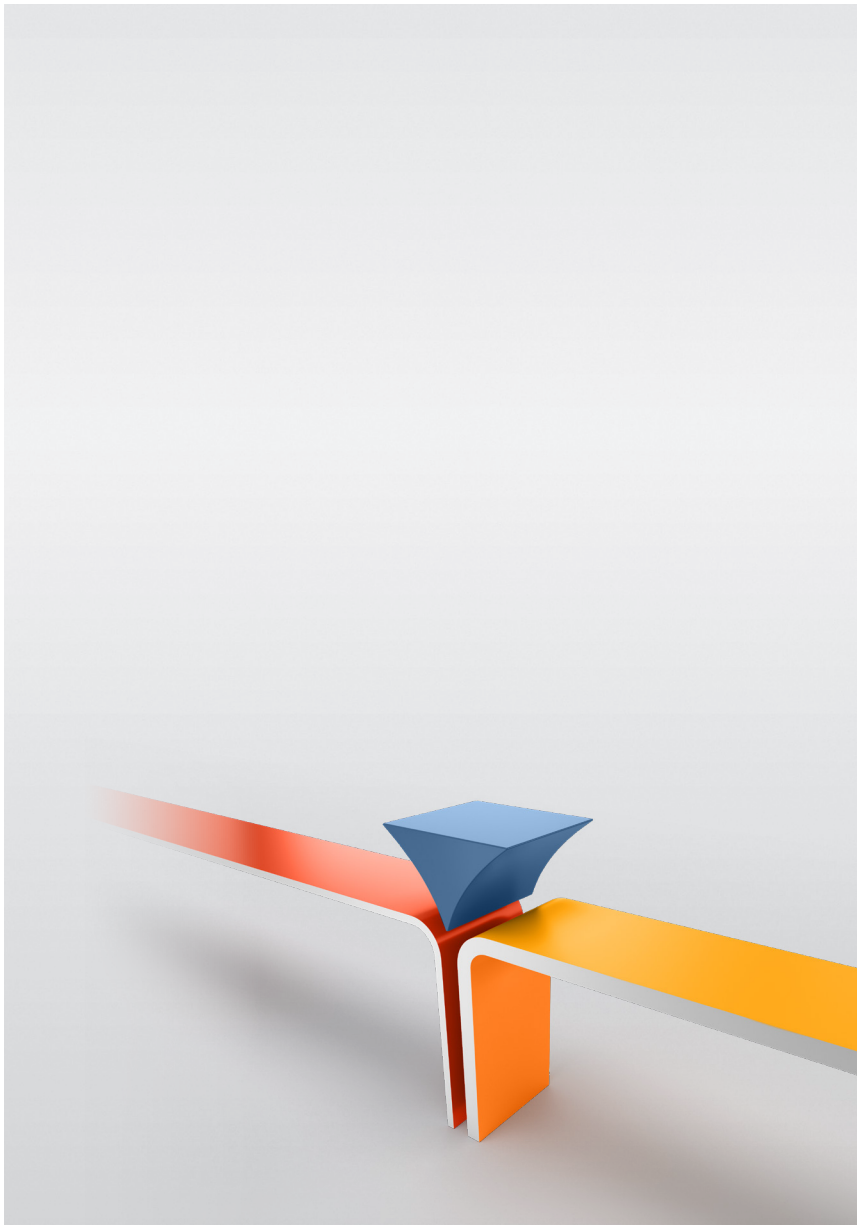

MAT-DE-2004261-342500-1.0.-08/2020

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

SANOFI GENZYME 